

# INSTRUKCE PRO STERILIZACI NÁSTROJŮ FIRMY PDT



Nástroje firmy PDT nejsou dodávány sterilní a je nutné je před prvním použitím vysterilizovat podle následujících instrukcí. Nástroje mohou být poškozeny použitím produktů na bázi kyselin a zásad, detergentů a podobných roztoků.

#### **Nevystavujte nástroje následujícím produktům a podmínkám :**

- Fenoly
- Jodofor
- Kyselina vinná, bělidla, peroxidy, prostředky na bělení zubů nebo odstranění zubního kamene
- Zrcátka do rukojetí dotahujte ručně, aby nedošlo k poškození nástroje

Při čištění vždy používejte jen pH neutrální roztoky. Před čištěním a sterilizací vždy odstraňte všechny obaly. Kontaminované nástroje mohou být čištěny pouze v rukavicích a s příslušnou ochranou očí.

Opakovaná sterilizace má na životnost PDT nástrojů minimální vliv, doba použitelnosti nástrojů je dána opotřebením a broušením. Čištění sond s leptanými měrkami ultrazvukem může po určité době způsobit zhoršení viditelnosti těchto měrek.

#### **Požadavky na sterilizaci:**

Nevystavujte nástroje teplotě **vyšší než 176 °C** (350° Fahrenheit).  
Sterilizace v autoklávu nebo horkým vzduchem je povolena.  
Doba sterilizace závisí na výši teploty.

**PDT Wingrove™ titanové nástroje na implantáty, kazety a brousící kameny mohou být rovněž sterilizovány za stejných podmínek jako ostatní PDT nástroje.**



#### **CRESCO PRAHA**

tel./fax: +420 284 821 078  
mobil: +420 603 437 629  
e-mail: [info@crescopraha.cz](mailto:info@crescopraha.cz)

[www.crescopraha.cz](http://www.crescopraha.cz)